

ICU-MENIOS の設置環境について

設置についての注意事項

- 10℃～32℃の範囲内で空調管理された室内に設置してください。
- 本製品の上部には、排熱ファンで機械内部の熱を逃がせるように、500 mm以上の空間が必要です。
- 本製品の上部に 500 mm以上の空間が無い場合は、背面の壁にファン付きのダクトが必要です。(応相談)
- 本製品の右側は、吸気のために壁面と 100 mm以上の隙間をあけてください。
- 電源は、AC100V 20A の電力供給が必要です。
- 電源コードは、必ずアース付きのコンセントに接続してください。(1本)
- コンセントは、床からH1750 mmに設置してください。
- 設置する床面は、水平で 200kg の荷重に耐えられる強度が必要です。
- 直射日光が当たる場所には、設置しないでください。
- 本製品の上部には、物を置かないでください。(故障の原因になります)
- 酸素供給は酸素ポンベにはP型アウトレット、酸素濃縮器にはシリコンチューブで接続します。
- 酸素の天吊リアウトレットホースは、背面から 650 mm位に取付けてください。

