

酸素校正



ICU を安心してご使用いただくためのご案内

酸素校正って
なんだろう？



大気中の酸素濃度 (21%) と ICU 内部の酸素センサーが認識している酸素濃度の規定値を一致させる為の処置です。

酸素校正しないと
どうなりますか？



- ・適切な酸素管理ができない。
- ・必要以上の酸素を消費してしまう。
- ・酸素センサーの劣化を早めてしまう。

酸素校正をいつ
行えばよいか？



ケージの扉を開放してしばらく経っても、ケージ内の酸素濃度が21%を表示しないとき。
→酸素校正が必要です。

酸素センサーの
交換時期？



- ・酸素表示が不安定になった。
- ・酸素校正を数回行っても酸素濃度が21%にならない。
- ・酸素センサー異常等のエラーメッセージが表示された。