

## ◆ ICU-MENIOSのご購入を検討されているお客様へ

### << 設置上の注意 >>

- 本機は空調で25℃前後に管理されている場所への設置を推奨します。
- 直射日光が当たる場所への設置はお控えください。
- 上部は排熱の為に500mm以上の空間が必要です。  
(上部に500mm以上の空間が無い場合は、弊社営業にご相談をお願いします。)
- 右側側面部に吸気口がありますので100mm以上のスペースが必要です。壁や他の物への密着した設置はできませんのでご注意ください。※別紙寸法図参照
- 背面側に外気導入ハッチがありますので100mm以上のスペースが必要です。壁への密着した設置はできませんのでご注意ください。※別紙寸法図参照
- 設置する床面は、水平で200Kg以上の耐荷重が必要です。
- 酸素のアウトレットは、すぐに手の届く位置でお使いください。
- コントローラー上部には外気温センサーと熱排気口があるため、物を置いたり布で覆ったりできませんのでご注意ください。

### << 搬入上の注意 >>

- 搬入経路は最低750mm以上の幅が必要です。
- 本機の向きを変える場合はMENIOS:1600mm×1600mm以上のスペースが必要です。  
MENIOS COMPACT: 1300mm×1300mm以上のスペースが必要です。

### << 電源関連 >>

電源は、専用のブレーカーの系統で単独の「3Pアース付きのコンセント」への接続が必要です。

- ( 抜け防止やアース未接続の可能性があるため、変換タップは使用することができませんのでご了承ください。)
- 安全の為、コンセントは電源コードの届く範囲内で水のかからない位置、手の届く位置に設備してください。
- 本機の最大消費電力は、1500Wです。必ず電気容量を確保した設備をご用意ください。
- 酸素濃縮器や輸液ポンプなどの本機以外の電気機器は、別系統のコンセントへの接続が必要です。


### << 重要なお願い >>

- お客様による本機への部品の追加・改造等は絶対にお止めください。
- 異常や故障時の患畜への対処のために無人状態になる環境下でのご使用は絶対にお止め下さい。
- 本機は動物用高度管理医療器です。必ず専任の管理責任者を任命し、その方の指示・指導の下での使用が必要です。
- 本機は常に目が届き、万が一異常があった際は直ちに対応ができる場所への設置が必要です。

安全なご利用のためにご確認ください。

不明な点やご心配な場合は、弊社営業にお気軽にご相談ください。

# MENIOS

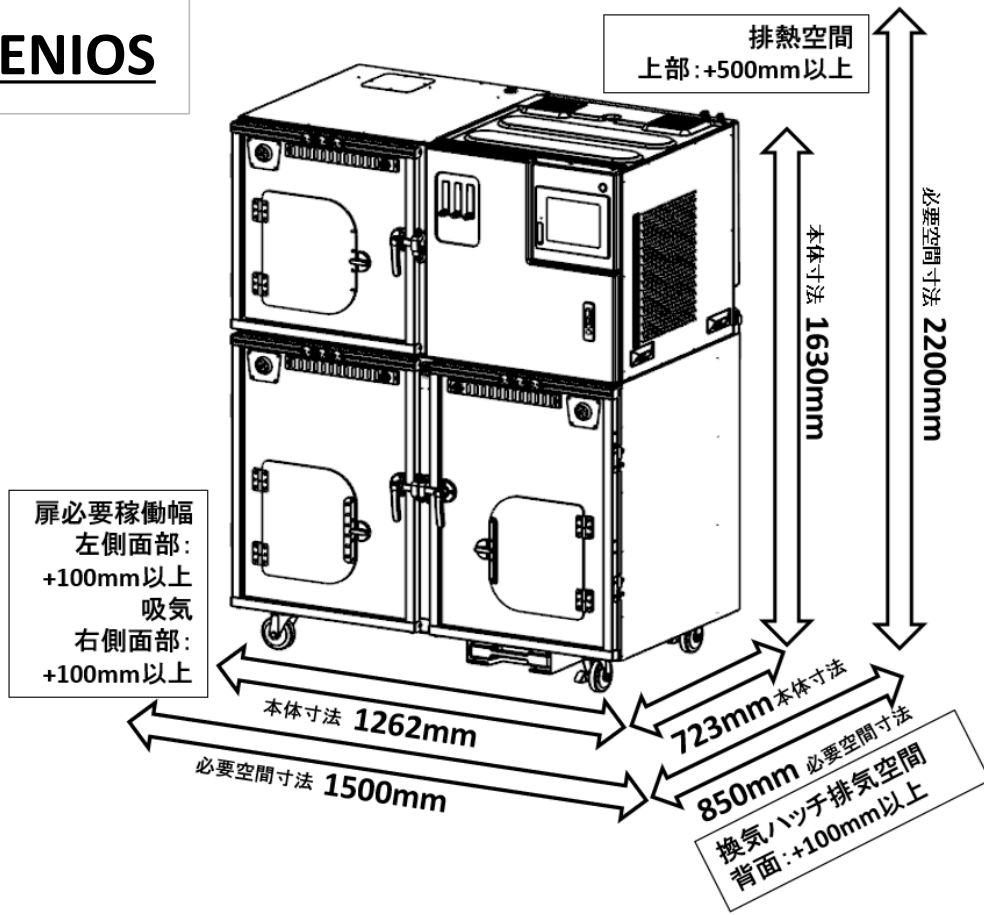

# MENIOS compact

